

# Guida rapida

Sedia a rotelle elettrica Robooter – App mobile

[PDF Pagina 1]

## Scansionare il codice QR per scaricare l'app mobile

### Installare l'app mobile

Questa schermata viene visualizzata dopo la scansione.  
Toccare INSTALLA per installare l'app mobile.

### Collegare il dispositivo

Toccare CERCA per cercare il dispositivo.  
Una volta completata questa operazione, l'app mobile inizia a cercare il dispositivo.

Toccare il dispositivo **DF:85:EC:73:15:05**  visualizzato per accoppiare l'app mobile con il dispositivo.

### Connessione riuscita

Questa schermata indica una connessione riuscita.  
Toccare CONFERMA per accedere alla schermata di stato della sedia a rotelle elettrica.

### Nota:

Quando la sedia a rotelle elettrica è in modalità blocco, viene visualizzata questa interfaccia. Dopo aver acceso la sedia a rotelle elettrica, la modalità blocco si attiva automaticamente. Utilizzare l'app mobile solo dopo aver sbloccato la sedia a rotelle elettrica.

Toccare  **Power off** SPEGNI per spegnere il dispositivo.

Toccare  **DISCONNETTI BLUETOOTH** per disconnettere la connessione Bluetooth.

Toccare **REGOLAZIONE VELOCITÀ** per regolare la velocità (5 livelli disponibili).

[PDF Pagina 2]

### Regolazione della modalità

Toccare MODALITÀ NORMALE nella schermata di stato per passare dalla modalità potenziata alla modalità normale.

### Note sull'utilizzo

Si consiglia di attivare questa modalità solo temporaneamente, per sbloccarsi da una situazione di stallo o per superare terreni difficili che richiedono molta potenza. Tornare immediatamente alla modalità normale dopo l'uso.

### Modalità telecomando

Toccare TELECOMANDO nella schermata di stato per accedere alla modalità telecomando. Scorrere verso l'alto per avanzare, verso il basso per indietreggiare, verso sinistra per girare a sinistra e verso destra per girare a destra.

### Impostazioni



Toccare l'icona dell'ingranaggio in alto a destra per accedere alle impostazioni.

#### Informazioni sulla batteria

Toccare INFORMAZIONI BATTERIA nelle impostazioni per visualizzare il livello di carica e lo stato della batteria.

#### Versione attuale

Sotto VERSIONE ATTUALE viene visualizzata la versione software attualmente installata. Toccare VERIFICA AGGIORNAMENTI per cercare aggiornamenti del software.

#### Requisiti minimi di sistema

- Android versione 6.0 o superiore
- iOS versione 9.0 o superiore
- Bluetooth versione 4.0 o superiore
- RAM minima: 1 GB
- Spazio di archiviazione richiesto: 50 MB