

Notice d'utilisation



Nom

Bavoir de protection jetable

Modèle

38x50cm, 40x60cm, 48x58cm, 36x64+10cm, 36x66+10cm, 37x50+10cm, 37x64+10cm, 37x65+10cm, 37x66+10cm, 38x65+10cm, 38x70+10cm, 40x60+10cm, 45x60+10cm

Utilisation prévue

Le produit est destiné à protéger le corps et les vêtements contre les souillures liées à l'alimentation et aux boissons. Il s'agit d'un dispositif jetable à usage unique, fourni non stérile.

Conservation

Conserver dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur et de la lumière directe du soleil.

Mode d'emploi

1. Lire attentivement l'étiquette et la notice d'utilisation avant l'emploi.
2. Retirer l'emballage. Ne pas utiliser le produit si l'emballage est endommagé ou si le produit est périmé.
3. Placez le bavoir autour du cou, sur la poitrine.

Durée de conservation

5 ans

Précautions

1. Ne pas utiliser si l'emballage ou le produit est endommagé.
2. Ce produit est à usage unique. La réutilisation est interdite.
3. Remplacer le produit en temps voulu s'il est endommagé ou imbibé.

Élimination

Veuillez éliminer le produit après utilisation conformément aux réglementations locales.

Étiquettes, symboles d'emballage

Symbole	Explication	Symbole	Explication
	Marquage CE		Dispositif médical
	Nom et adresse du fabricant		Représentant autorisé dans l'UE

	Date de fabrication		Utilisable jusqu'à (date de péremption)
	Code de lot		Ne pas réutiliser / Usage unique
	Avertissements et précautions		Non stérile
	Consulter la notice d'utilisation		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Identification unique du dispositif		Pays de fabrication
	Importateur		Distributeur
	Numéro de modèle		Mandataire suisse

Fabricant



Société : Changzhou Newrise Medical & Hygiene Products Co., Ltd
Adresse : No. 39 Chuangye Road, Zhulin Town, Jintan District,
Changzhou City, Jiangsu, China 213241

Représentant autorisé dans l'UE (EU REP)



Société : SUNGO Europe B.V.
Adresse : Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan
den IJssel, The Netherlands

Mandataire suisse (CH REP)



Société : Sana Swiss Services AG
Adresse : Niedermattstrasse 8c, 4528 Zuchwil, Switzerland