




## SOFT 0 - 7

Attends Soft sind saugfähige und besonders diskrete Einlagen, die speziell für empfindliche Haut entwickelt wurden. Sie sind bei sehr leichter bis starker Harninkontinenz geeignet.




### Anlegehinweise

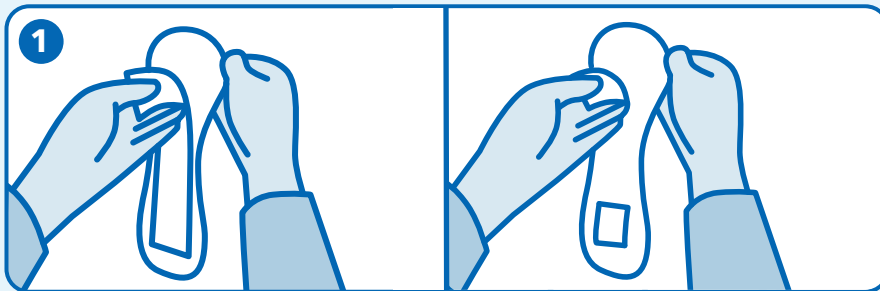


Entfernen Sie den durchgängigen Abziehstreifen von der Rückseite der Einlage (Soft 0-4).

Entfernen Sie die beiden kurzen Abziehstreifen von der Rückseite der Einlage (Soft 5-7).

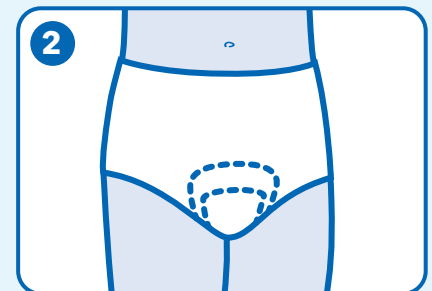

Befestigen Sie die Einlage mit der klebenden Seite in Ihrer möglichst enganliegenden Unterwäsche.

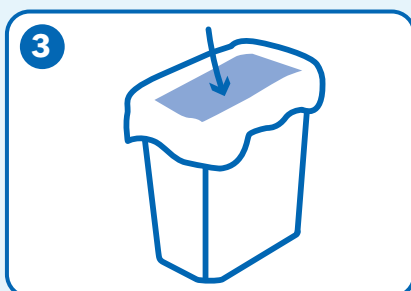

Rollen Sie das Produkt nach Gebrauch zusammen und entsorgen Sie es im Restmüll.

Mehr Informationen auf  
[www.attends.at](http://www.attends.at) - [www.attends.de](http://www.attends.de)

## SOFT 0 - 7

### Hinweise und Tipps

#### Produktauswahl

- Wählen Sie die passende Produktgröße und Saugstärke.
- Für eine optimale Produktleistung empfiehlt es sich, die Einlage in möglichst enganliegender Unterwäsche zu tragen.
- Durch die Auswahl des kleinstmöglichen Produktes und einer ausreichenden Saugstärke sparen Sie Abfall und reduzieren die Umweltbelastung im Vergleich zu einer unnötig hohen Saugstärke.

#### Entsorgung

- Rollen Sie das Produkt zusammen und entsorgen Sie es im Restmüll.
- Wenn vorhanden, können Sie zum Entsorgen das gebrauchte Produkt in eine frische Einzelverpackung einwickeln.
- Entsorgen Sie das Produkt auf keinen Fall über die Toilette.



**Hautverträglichkeit** bestätigt  
von proderm Institut für  
Angewandte Dermatologische  
Forschung. Getestet im  
Auftrag von Attends.