



**Systemanbieter für
ableitende Inkontinenz**

GESAMTKATALOG
www.ghc-medical.de

Einleitung

Mit unserem Sortiment an ableitenden Inkontinenzprodukten haben wir uns als GHC German Health Care GmbH auf einen Versorgungsbereich konzentriert, bei dem wir ein umfassendes Produktspektrum mit einer sehr hohen Expertise anbieten können. Und darauf dürfen sich unsere Kunden, insbesondere in den in vielerlei Hinsicht herausfordernden Zeiten, verlassen.

Sie finden bei uns unter anderem eine breite Auswahl an transurethralen und suprapubischen Ballonkathetern, unterschiedliche Katheter-Legesets, Urinkondomen, ein breites Sortiment von Urinaufgangssystemen und -beuteln sowie Beutelhaltesysteme und Zubehör. Neu im Sortiment sind die ersten Ausführungen der neuen ISK-Produktlinie der GHC, CARE CATH Liv & Leiv (Seite 39/40).

In unserem aktuellen Katalog finden Sie weitere neue Produkte, die wir für unsere Kunden aus HomeCare-Unternehmen, Sanitätshäusern und Kliniken ins Sortiment aufgenommen haben. So bieten wir mit der Urinkondom-Serie CARE CON (Seite 41-43) eine sehr gute und zuverlässige Qualität zu einem attraktiven Preis. Unser neuer transurethraler Soft-Silikonballonkatheter (Seite 9) ist durch das weichere Schaftmaterial eine sehr gute Alternative zum bestehenden Ballonkatheter-Sortiment im HomeCare-Markt. Der neue, transurethrale Silikonkatheter mit Flötenspitze (Seite 14) eignet sich hervorragend, um insbesondere für das Patientenklintel mit problematischen Urinbefunden eine sehr gute Lösung zu bieten. Und auch unsere neuen PVC-Einmalkatheter ergänzen unser Produktsortiment (Seite 17/18). Neben der hohen Produktqualität sichern wir auch für die neuen Produkte eine hohe Lieferzuverlässigkeit zu.

Mit dem Gesamtkatalog bieten wir Ihnen einen Überblick über das komplette Sortiment der GHC. Schauen Sie aber auch gerne auf **www.ghc-medical.de**, um tagesaktuelle Informationen und neue Produkte zu sehen.

Durch erweiterte Lagerkapazitäten, einer neuen Lagerverwaltungssoftware und einer hohen Serviceorientierung mit Unterstützungsangeboten haben wir uns für die Zukunft gut aufgestellt. Zum Beispiel haben wir ein Kundenportal geschaffen, in dem alle MDR-relevanten Dokumente für unser Sortiment jederzeit einsehbar und zum Download bereitstehen. Ein Service, der viel Zeit spart und Sicherheit schafft, dass alle notwendigen Unterlagen und Zertifikate aktuell sind und vorliegen.

Kommen Sie gerne auf uns zu und lassen Sie sich von den Vorteilen für Ihr Unternehmen durch die Zusammenarbeit mit der GHC German Health Care GmbH überzeugen.

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.

Herzliche Grüße von der GHC-Geschäftsführung,


Dirk Dohmann
Kay Kruse

Inhaltsverzeichnis

Einleitung	Seite 3
Inhaltsverzeichnis	Seite 4,5
GHC Qualitätspolitik	Seite 6
Katheterleitfaden	Seite 7
CARE FLOW Transurethrale Katheter	
CARE FLOW Silikonkatheter, Nelatonspitze	Seite 8
CARE FLOW Soft Silikonkatheter, Nelatonspitze	Seite 9
CARE FLOW Silikonkatheter - integral, Nelatonspitze, mit Stopfen	Seite 10
BLUECATH Silikonkatheter - integral, Nelatonspitze, mit Stopfen	Seite 11
CARE FLOW Silikonelastomerkatheter, Nelatonspitze	Seite 12
CARE FLOW Silikonkatheter, Tiemannspitze	Seite 13
CARE FLOW Silikonkatheter, Flötenspitze	Seite 14
CARE FLOW Silikonelastomerkatheter, Couvelairespitze	Seite 15
CARE FLOW Silikonisierte Latexkatheter, Nelatonspitze	Seite 16
CARE FLOW PVC Frauen Einmalkatheter, Nelatonspitze	Seite 17
CARE FLOW PVC Männer Einmalkatheter, Nelaton- & Tiemannspitze	Seite 18
CARE FLOW Spül-Katheter	
CARE FLOW Silikon-Spülkatheter Nelatonspitze	Seite 19
CARE FLOW Silikon-Spülkatheter Dufourspitze	Seite 20
CARE FLOW Silikon-Spülkatheter Couvelairespitze	Seite 21
CARE FLOW Silikon-Spülkatheter Mercierspitze	Seite 22
CARE FLOW Suprapubische Katheter	
CARE FLOW UNIBAL Silikonkatheter - integral - zentral offen	Seite 23
CARE FLOW UNIBAL Silikonkatheter - integral - zentral offen, mit Stopfen	Seite 24
CARE FLOW Silikonkatheter - integral - zentral offen, mit Stopfen	Seite 25
CARE FLOW UNIBAL Silikonkatheter - integral - zentral offen, kurz	Seite 26
BLUECATH Silikonkatheter - integral - Dilatationspitze, mit Stopfen	Seite 27
BLUECATH Silikonkatheter - integral - zentral offen, mit Stopfen	Seite 28
CARE FLOW Silikonkatheter blue - integral - zentral offen, mit Stopfen	Seite 29
BLUECATH Silikonkatheter - integral - zentral offen, kurz, mit Stopfen	Seite 30
CARE FLOW UNIBAL Punktionsset	Seite 31
CARE FLOW UNIBAL Wechselset, inkl. PTFE-Führungsdraht	Seite 32
CARE FLOW Nephrostomie-Katheter	
CARE FLOW Silikonkatheter - integral - Dilatationsspitze	Seite 33
CARE SET Katheterlegesets und Zubehör	
Katheterlegeset Basis und Klinik	Seite 34
Katheterlegeset Comfort und Comfort Plus	Seite 35
Katheterlegeset Comfort Eco	Seite 36
Zubehör (Blockerspritze, Gleitgel, Katheterstopfen)	Seite 37

Inhaltsverzeichnis

CARE FLOW Katheterventile	
CARE FLOW und CARE VENT	Seite 38
CARE ISK Intermittierender Selbstkatheterismus	
CARE CATH ^{flex} IK-Einmalkatheter, hydrophil, 17 cm neu	Seite 39
CARE CATH ^{flex} IK-Einmalkatheter, hydrophil, 41 cm neu	Seite 40
CARE MEK Urinalkondome aus Silikon	
CARE CON Urinalkondom comfort / Typ I	Seite 41
CARE CON Urinalkondom special / Typ II	Seite 42
CARE CON Urinalkondom active / Typ III	Seite 43
CARE FLOW Urindrainagesysteme und Zubehör	
CARE FLOW UB 4000 TUR Geschlossenes TUR Spülbeutelsystem	Seite 44
CARE FLOW UB 4000 Geschlossenes Urindrainagesystem	Seite 45
CARE FLOW UB 2000 Geschlossenes Urindrainagesystem	Seite 46
CARE FLOW UB 2000S Geschlossenes Urindrainagesystem, inkl. CARE BAG neu	Seite 47
CARE FLOW UB 2000A Bettbeutel	Seite 48
CARE FLOW UB 2000E Einmal-Bettbeutel, inkl. UB 2000US, PVC Beutelhalterung	Seite 49
CARE FLOW UB 2000USo, UB 1500USo, SB 1500USo Einmal-Bettbeutel ohne Ablass	Seite 50
CARE FLOW UB 1000 Geschlossenes Urindrainagesystem Tag & Nacht	Seite 51
CARE FLOW UB 750/750US 1-Kammer Beinbeutelsystem	Seite 52
CARE FLOW UB 750F/750UF 1-Kammer Beinbeutelsystem mit Kippventil	Seite 53
CARE FLOW UB 500/500US 3-Kammer Beinbeutelsystem	Seite 54
CARE FIX Beinbeutelfixiersysteme	
CARE FIX Kletthalteband Universal	Seite 55
CARE FIX Kletthaltebänder Premium-Set, mit und ohne Knöpfe	Seite 56
CARE FIX Fixierstrümpfe mit integrierter Beinbeuteltasche, mit und ohne Klettverschluss	Seite 57
CARE FIX Stulpen für Oberschenkel	Seite 58
CARE FIX Stulpen für Unterschenkel	Seite 59
CARE FIX Einbeinhosen Premium	Seite 60
CARE DRESS Verbandsstoffe	
Suprapubisches Verbandset	Seite 61
PEG Verbandset	Seite 62
Kontakt	Seite 63

Die German Health Care GmbH steht für innovative Lösungen bei der medizinischen Versorgung von Betroffenen mit körperlichen Beeinträchtigungen. Als Importeur und Vertreiber von Produkten speziell für das Blasenmanagement bieten wir Kliniken und HomeCare-Unternehmen ein breites Portfolio an individuellen Lösungen zur Verbesserung der Lebensqualität ihrer Kunden – mit der Sicherheit einer hohen Produktqualität und zuverlässigen Anwendung.

Unsere umfangreiche Produktpalette haben wir in strategischer Zusammenarbeit mit namhaften Herstellern aufgebaut. Durch den intensiven Austausch unterliegen unsere Produkte nicht nur einer steti- gen Verbesserung, auch neue Medizinprodukte werden ins Sortiment aufgenommen. Daher schätzen nicht nur marktführende HomeCare-Versorger, Kliniken und Einkaufsgemeinschaften aus dem Sani- tätshausfachhandel seit Jahren die Qualität unseres Produktangebotes und Dienstleistungen.

Die Produktion erfolgt nach klaren Vorgaben und Spezifikationen an unterschiedlichen Stand- orten unserer Hersteller, weltweit. In regelmäßig stattfindenden Audits wird die Qualität der Ferti- gungsprozesse in den einzelnen Produktions- stätten überprüft. Nach der Produktion finden jeweils umfassende Qualitätskontrollen durch die Hersteller statt, bevor die Ware versandt wird, so- wie erneut, wenn die Ware im Hochregallager in Wees eintrifft. Bevor die GHC-Produkte an unsere Kunden versandt werden, sind diese umfassend geprüft und getestet. Ausschließlich einwandfrei produzierte Produkte werden für den Einsatz frei- gegeben. Auf diese strenge Qualitätspolitik dür- fen sich unsere Kunden verlassen.



Die Qualitätspolitik wird auch in unserem Qualitätsmanagement-System nach DIN EN ISO 13485 regelmäßig überwacht und durch die DQS auditiert.

Aber nicht nur auf die Qualität unserer Produkte dürfen Sie sich gerne verlassen. Auch unsere Mitarbei- tenden bilden die Basis unseres Erfolges. Unsere qualifizierten Medizinprodukteberater*innen im In- nen- und Außendienst beraten Sie gerne zu allen Fragen rund um das GHC-Sortiment und kümmern sich um die schnellstmögliche Bearbeitung Ihrer Anliegen. Durch kontinuierliche Inhouse-Workshops und Weiterbildungen sowie durch IT-gestützte Prozesse wird diese Fachkompetenz garantiert, so dass Ihre Anfragen, Ihre Bestellungen und Ihre Ware schnellstmöglich bearbeitet und zum Versand ge- bracht werden. Damit dürfen Sie rechnen.

Sichern Sie sich durch die Zusammenarbeit mit der GHC German Health Care GmbH die Qualität in der Versorgung durch den Systemanbieter für die ableitende Inkontinenzversorgung.

KATHETER ABC Katheterleitfaden



Größe: 1 Charrière (CH = 1 French 0,33mm)

Wir führen Katheter aus verschiedenen Materialien mit unterschiedlichen Spezifikationen, um allen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht zu werden. Darunter sind Katheter aus Vollsilikon und Silikonelastomer zur Langzeitdrainage, aber auch Latexkatheter zur Kurzzeitdrainage.

Klassische Kathetermaterialien



Vollsilikon



Silikonelastomer –
Latexkern mit Silikon-
ummantelung



Latex

Klassische Katheterspitzen für die transurethrale und suprapubische Harnableitung



Nelatonspitze



Tiemannspitze



zentral offen



Dilatationsspitze



Couvelairespitze



Mercierspitze



Dufourspitze



Flötenspitze

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW
Transurethrale 100% Silikonkatheter
2-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ In den CH-Größen 06 - 10 sind die Katheter mit einer stabilisierenden Führungsschiene ausgestattet.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Nelatonspitze

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 06	03 ml	27 cm	01/01/11/06/03/GHC	01150196
CH 08	05 ml	27 cm	01/01/11/08/05/GHC	01150204
CH 10	05 ml	27 cm	01/01/11/10/05/GHC	01150210
CH 12	10 ml	40 cm	01/01/11/12/10/GHC	01150368
CH 14	10 ml	40 cm	01/01/11/14/10/GHC	01150374
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/11/16/30/GHC	01150380
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/11/18/30/GHC	01150397
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/11/20/30/GHC	01150428
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/11/22/30/GHC	01150434
CH 24	30 ml	40 cm	01/01/11/24/30/GHC	01150440
CH 26	30 ml	40 cm	01/01/11/26/30/GHC	01150457

HMN: 15.25.15.6136



Ballonvolumen: 03-30 ml

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW
Transurethrale *Soft* 100% Silikonkatheter
2-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ In den CH-Größen von 06 - 10 sind die Katheter mit einer stabilisierenden Führungsschiene ausgestattet.
- ✓ Sehr hoher Tragekomfort durch Soft-Silikonmaterial des Katheterschaftes.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ Die Katheter eignen sich für die Langzeitdrainage.



Nelatonspitze

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 06	03 ml	31 cm	01/01/01/06/03/GHC	17883185
CH 08	05 ml	31 cm	01/01/01/08/05/GHC	17883216
CH 10	05 ml	31 cm	01/01/01/10/05/GHC	17883222
CH 12	10 ml	40 cm	01/01/01/12/10/GHC	17883239
CH 14	10 ml	40 cm	01/01/01/14/10/GHC	17883251
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/01/16/30/GHC	17883268
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/01/18/30/GHC	17883274
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/01/20/30/GHC	17883280
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/01/22/30/GHC	17883297
CH 24	30 ml	40 cm	01/01/01/24/30/GHC	17883305
CH 26	30 ml	40 cm	01/01/01/26/30/GHC	17883311

HMN: 15.25.15.6044



Ballonvolumen: 03-30 ml

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW

Transurethrale *integral* 100% Silikonkatheter

2-Wege integral Ballonkatheter mit Nelatonspitze und Stopfen

- Produktspezifikationen:
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den in den Schaft eingearbeiteten *integral* Ballon.
 - ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
 - ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
 - ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
 - ✓ MRT-Kompatibilität.
 - ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



HMN: 15.25.15.6050

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	41 cm	01/01/25/12/05/GHC	18064437
CH 14	05 ml	41 cm	01/01/25/14/05/GHC	18064443
CH 16	10 ml	41 cm	01/01/25/16/10/GHC	18064466
CH 18	10 ml	41 cm	01/01/25/18/10/GHC	18064472
CH 20	10 ml	41 cm	01/01/25/20/10/GHC	18064489
CH 22	10 ml	41 cm	01/01/25/22/10/GHC	18064495

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril



Ballonvolumen: 05-10 ml


Abbildungen können vom Original abweichen

BLUECATH

Transurethrale *integral* 100% Silikonkatheter

2-Wege integral Ballonkatheter mit Nelatonspitze und Stopfen

- Produktspezifikationen:
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den in den Schaft eingearbeiteten *integral* Ballon.
 - ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
 - ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
 - ✓ MRT-Kompatibilität.
 - ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.

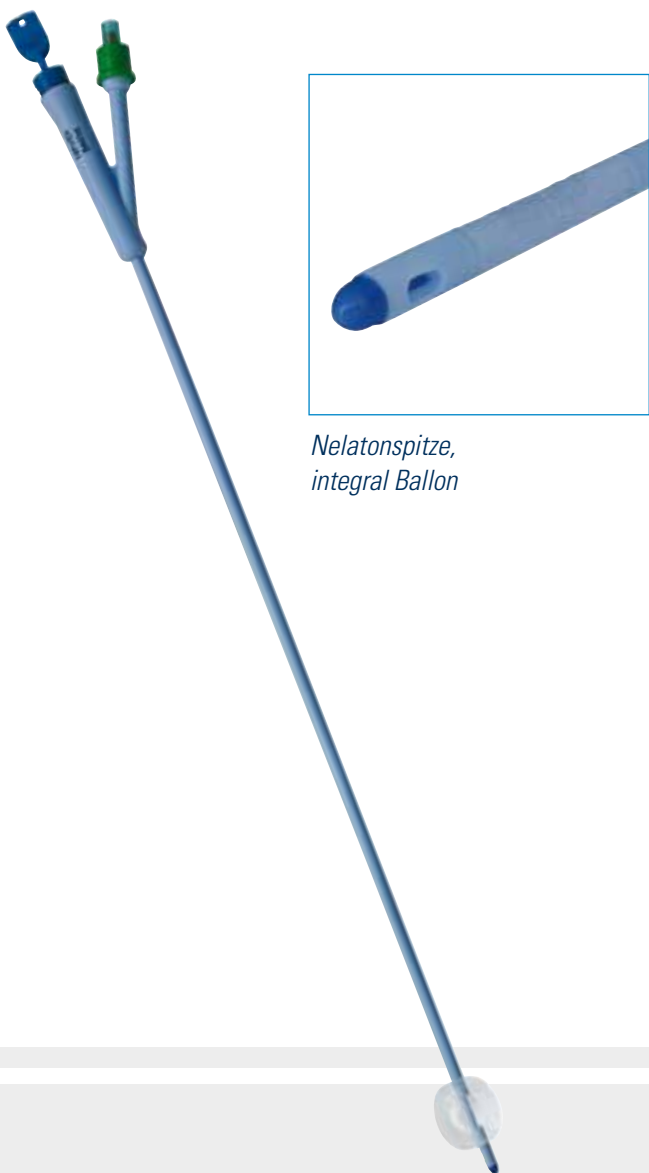

HMN: 15.25.15.6051

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	41 cm	01/01/26/12/05/GHC	18064503
CH 14	05 ml	41 cm	01/01/26/14/05/GHC	18064526
CH 16	10 ml	41 cm	01/01/26/16/10/GHC	18064532
CH 18	10 ml	41 cm	01/01/26/18/10/GHC	18064549
CH 20	10 ml	41 cm	01/01/26/20/10/GHC	18064555
CH 22	10 ml	41 cm	01/01/26/22/10/GHC	18064561

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW
Transurethrale Silikonelastomerkatheter
2-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Hohe Elastizität und Tragekomfort durch die Silikonummantelung des Latexkerns an der inneren und äußeren Katheterwand.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und eine geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.



Nelatonspitze



Silikonelastomer – Latexkern mit Silikonummantelung

HMN: 15.25.15.6144



Ballonvolumen: 10-30 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	10 ml	40 cm	01/01/10/12/10/GHC	01149371
CH 14	30 ml	40 cm	01/01/10/14/30/GHC	01149388
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/10/16/30/GHC	01149394
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/10/18/30/GHC	01149939
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/10/20/30/GHC	01149945
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/10/22/30/GHC	01149951
CH 24	30 ml	40 cm	01/01/10/24/30/GHC	01149968
CH 26	30 ml	40 cm	01/01/10/26/30/GHC	01150173


Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW
Transurethrale 100% Silikonkatheter
2-Wege Ballonkatheter mit Tiemannspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Atraumatische dilatierende Kugelspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.

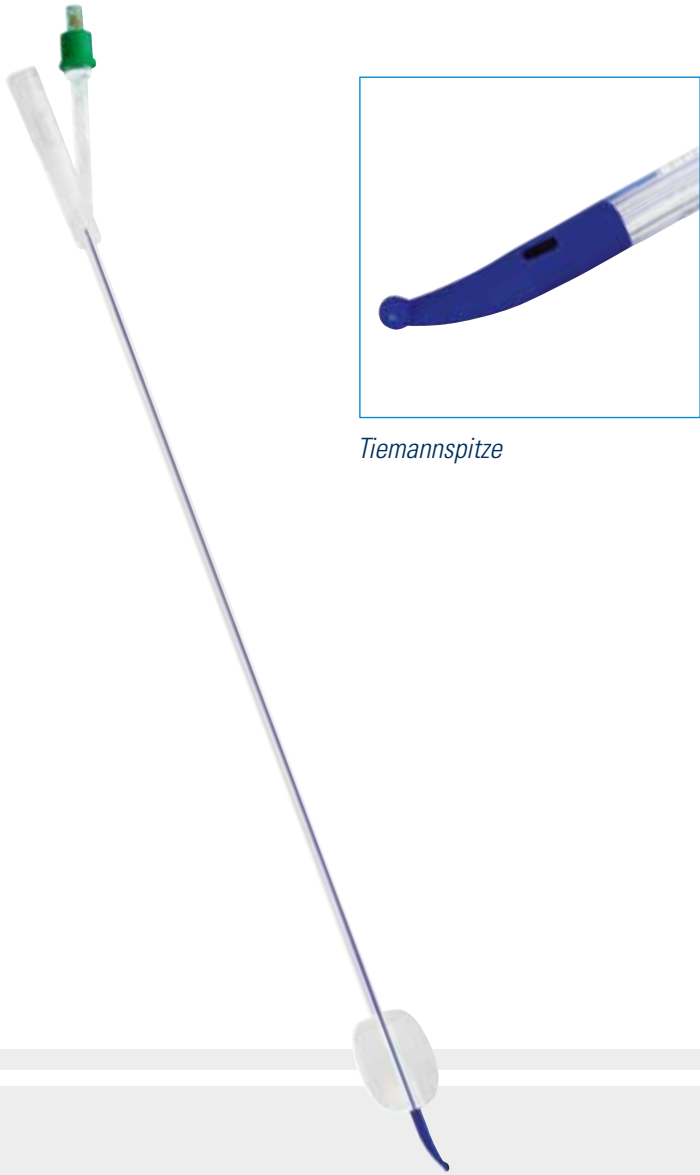

Tiemannspitze

HMN: 15.25.15.6049



Ballonvolumen: 5-30 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	40 cm	01/01/08/12/05/GHC	17933670
CH 14	20 ml	40 cm	01/01/08/14/20/GHC	17933687
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/08/16/30/GHC	17933693
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/08/18/30/GHC	17933701
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/08/20/30/GHC	17933718
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/08/22/30/GHC	17933724

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW

Transurethrale 100% Silikonkatheter

2-Wege Ballonkatheter mit Flötenspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Sehr gute Drainageleistung durch zentral offene Spitze, seitliches Drainageauge und großes Innenlumen, auch bei kritischen Urinbefunden.
- ✓ Atraumatische Flötenspitze ermöglicht gutes Vorschieben des Katheters.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich für die Langzeitdrainage.



Zentral offene Flötenspitze

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	10 ml	40 cm	01/01/07/12/10/GHC	17933747
CH 14	10 ml	40 cm	01/01/07/14/10/GHC	17933753
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/07/16/30/GHC	17933776
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/07/18/30/GHC	17933782
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/07/20/30/GHC	17933799
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/07/22/30/GHC	17933807

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen


CARE FLOW

Transurethrale Silikonelastomerkatheter

2-Wege Ballonkatheter mit Couvelairespitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Hohe Elastizität durch die Silikonummantelung an der inneren und äußeren Katheterwand.
- ✓ Optimale Drainageleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen und offene Couvelairespitze.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 60 ml.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.

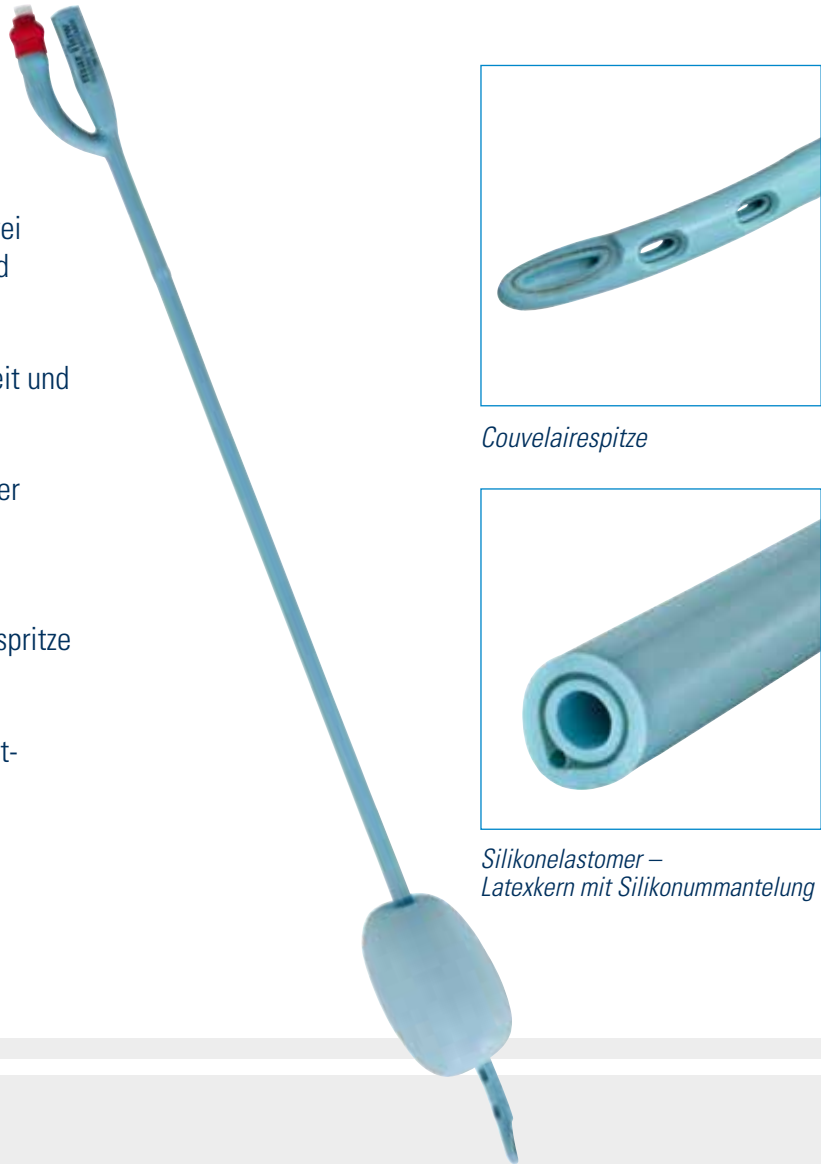

Couvelairespitze

Silikonelastomer – Latexkern mit Silikonummantelung

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 18	60 ml	40 cm	01/01/15/18/60/GHC	06434975
CH 20	60 ml	40 cm	01/01/15/20/60/GHC	06434952
CH 22	60 ml	40 cm	01/01/15/22/60/GHC	06434969
CH 24	60 ml	40 cm	01/01/15/24/60/GHC	09710080

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

Ballonvolumen bis zu 60 ml

CARE FLOW
Transurethrale silikonisierte Latexkatheter
2-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Gefertigt aus hochwertigem silikonisiertem medizinischen Latex.
- ✓ Die Katheter bestechen durch ihren angenehmen Tragekomfort.
- ✓ Die sichere Fixierung der Katheter in der Blase wird durch die hohe Ballonkapazität von bis zu 30 ml erzielt.
- ✓ Verwenden Sie hierfür unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Die Katheter eignen sich nur zur Kurzzeit-drainage von bis zu 5 Tagen.
- ✓ Diese Produkte enthalten Naturlatex, welches allergische Reaktionen auslösen kann.



Nelatonspitze

HMN: 15.25.15.5076



Ballonvolumen: 10-30 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	10 ml	40 cm	01/01/13/12/10/GHC	01150701
CH 14	10 ml	40 cm	01/01/13/14/10/GHC	01150859
CH 16	30 ml	40 cm	01/01/13/16/30/GHC	01150865
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/13/18/30/GHC	01150871
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/13/20/30/GHC	01150888
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/13/22/30/GHC	01150919

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW
Transurethrale PVC Frauen Einmalkatheter
Transparent mit Trichter und Nelatonspitze, DEHP-frei

Produktspezifikationen:

- ✓ Einmalkatheter mit zwei seitlich versetzten Drainageaugen.
- ✓ Abgerundete, geschlossene Spitze.
- ✓ Weiches PVC-Material.
- ✓ DEHP-frei.
- ✓ Die Katheter eignen sich ausschließlich zum Einmalkatheterismus.



Nelatonspitze

HMN: 15.25.14.4001



Seitlich versetzte Augen

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 08	20 cm	01/01/35/08/00/GHC	18320975
CH 10	20 cm	01/01/35/10/00/GHC	18320981
CH 12	20 cm	01/01/35/12/00/GHC	18320998
CH 14	20 cm	01/01/35/14/00/GHC	18321006
CH 16	20 cm	01/01/35/16/00/GHC	18321035

Verpackungseinheit: 100 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW

Transurethrale PVC Männer Einmalkatheter

Transparent mit Trichter und Nelatonspitze/Tiemannspitze, DEHP-frei

Produktspezifikationen:

- ✓ Einmalkatheter mit zwei seitlich versetzten Drainageaugen.
- ✓ Abgerundete, geschlossene Nelatonspitze oder Tiemannspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Weiches PVC-Material.
- ✓ DEHP-frei.
- ✓ Die Katheter eignen sich ausschließlich zum Einmalkatheterismus.



Nelatonspitze

Tiemannspitze

HMN: 15.25.14.4005

Nelatonspitze

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	40 cm	01/01/36/10/00/GHC	18321058
CH 12	40 cm	01/01/36/12/00/GHC	18321064
CH 14	40 cm	01/01/36/14/00/GHC	18321070
CH 16	40 cm	01/01/36/16/00/GHC	18321087
CH 18	40 cm	01/01/36/18/00/GHC	18321093

Tiemannspitze

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	40 cm	01/01/37/12/00/GHC	18321124
CH 14	40 cm	01/01/37/14/00/GHC	18321130
CH 16	40 cm	01/01/37/16/00/GHC	18321147
CH 18	40 cm	01/01/37/18/00/GHC	18321153
CH 20	40 cm	01/01/37/20/00/GHC	18321176

Verpackungseinheit: 100 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW

Transurethrale 100% Silikonspülkatheter

3-Wege Ballonkatheter mit Nelatonspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Atraumatische Nelatonspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Optimale Drainage- und Spüleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Die sichere Fixierung der Katheter in der Blase wird durch die hohe Ballonkapazität erzielt.
- ✓ Verwenden Sie hierfür unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur postoperativen Langzeitdrainage.



Nelatonspitze

Ballonvolumen: 30 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 18	30 ml	40 cm	01/01/22/18/30/GHC	15618237
CH 20	30 ml	40 cm	01/01/22/20/30/GHC	15618243
CH 22	30 ml	40 cm	01/01/22/22/30/GHC	15618266
CH 24	30 ml	40 cm	01/01/22/24/30/GHC	15618295

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW
Transurethrale 100% Silikonspülkatheter
3-Wege Ballonkatheter mit Dufourspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Optimale Drainage- und Spülleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen und offener Spitze.
- ✓ Atraumatische, knickstabile Dufourspitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch großes Ballonvolumen.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenologische Darstellung der Spitze.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur postoperativen Langzeitdrainage.



Dufourspitze

HMN: 15.25.15.3035



Ballonvolumen: 40-70 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 18	40 ml	40 cm	01/01/16/18/40/GHC	01151178
CH 20	50 ml	40 cm	01/01/16/20/50/GHC	01151184
CH 22	60 ml	40 cm	01/01/16/22/60/GHC	01151190
CH 24	70 ml	40 cm	01/01/16/24/70/GHC	01151379

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW
Transurethrale 100% Silikonspülkatheter
3-Wege Ballonkatheter mit Couvelairespitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Optimale Drainage- und Spülleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen und offener Spitze.
- ✓ Atraumatische, knickstabile Couvelairespitze zur komplikationslosen Passage der Prostataloge.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch großes Ballonvolumen.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenologische Darstellung der Spitze.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur postoperativen Langzeitdrainage.



Couvelairespitze

HMN: 15.25.15.3036



Ballonvolumen: 40-70 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 18	40 ml	40 cm	01/01/17/18/40/GHC	01151385
CH 20	50 ml	40 cm	01/01/17/20/50/GHC	01151391
CH 22	60 ml	40 cm	01/01/17/22/60/GHC	01151416
CH 24	70 ml	40 cm	01/01/17/24/70/GHC	01151439

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW
Transurethrale 100% Silikonspülkatheter
3-Wege Ballonkatheter mit Mercierspitze

Produktspezifikationen:

- ✓ Optimale Drainage- und Spüleistung durch zwei seitlich versetzte Drainageaugen.
- ✓ Atraumatische, knickstabile Mercierspitze zur komplikationslosen Passage der Prostata-loge.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch großes Ballonvolumen.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenologische Darstellung der Spitze.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur postoperativen Langzeitdrainage.



Mercierspitze

HMN: 15.25.15.3037



Ballonvolumen: 40-70 ml

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 18	40 ml	40 cm	01/01/18/18/40/GHC	01151511
CH 20	50 ml	40 cm	01/01/18/20/50/GHC	01151528
CH 22	60 ml	40 cm	01/01/18/22/60/GHC	01151534
CH 24	70 ml	40 cm	01/01/18/24/70/GHC	01151540


Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW UNIBAL
Suprapubische integral 100% Silikonkatheter
2-Wege Ballonkatheter

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem integral Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Die Katheter bestechen durch ihren angenehmen Tragekomfort.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Für die sichere Fixierung der Katheter in der Blase verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.

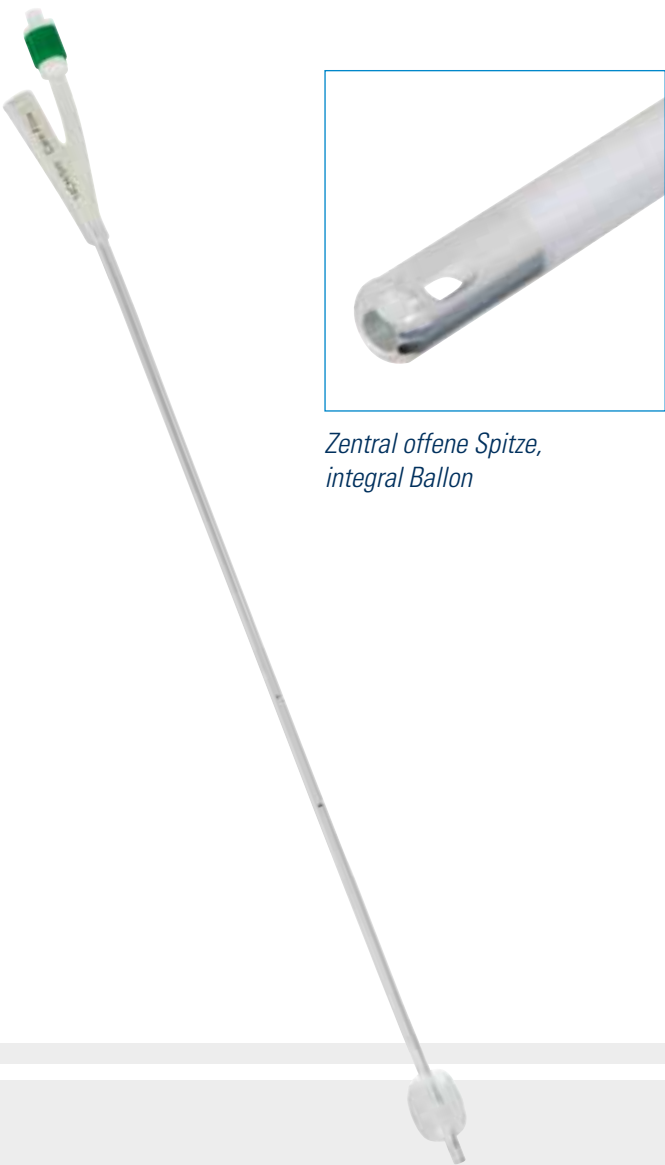

Zentral offene Spitze, integral Ballon

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	03 ml	40 cm	01/02/12/10/03/GHC	01152568
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/12/12/05/GHC	01152574
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/12/14/05/GHC	01152605
CH 16	10 ml	40 cm	01/02/12/16/10/GHC	01152611
CH 18	10 ml	40 cm	01/02/12/18/10/GHC	01152628
CH 20	10 ml	40 cm	01/02/12/20/10/GHC	01152700
CH 22	10 ml	40 cm	01/02/12/22/10/GHC	01152717

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

Ballonvolumen: 03-10 ml



CARE FLOW UNIBAL
Suprapubische *integral* 100% Silikonkatheter
2-Wege Ballonkatheter mit Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszia beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Die Katheter bestechen durch ihren angenehmen Tragekomfort.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Für die sichere Fixierung der Katheter in der Blase verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT - Kompatibilität.



Zentral offene Spitze,
integral Ballon

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	03 ml	40 cm	01/02/14/10/03/GHC	10198115
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/14/12/05/GHC	10198121
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/14/14/05/GHC	10198138
CH 16	10 ml	40 cm	01/02/14/16/10/GHC	10198144
CH 18	10 ml	40 cm	01/02/14/18/10/GHC	10198150
CH 20	10 ml	40 cm	01/02/14/20/10/GHC	10198167
CH 22	10 ml	40 cm	01/02/14/22/10/GHC	10198173

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril



Ballonvolumen: 03-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW
Suprapubische 100% Silikonkatheter *integral*
2-Wege Ballonkatheter mit Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet, so dass der Schaft keinen Kalibersprung hat. Schmerzhafte Stauchungen an der Faszia beim Einlegen des Katheters werden dadurch verhindert.
- ✓ Die Katheter zeichnen sich durch guten Tragekomfort aus.
- ✓ Für die sichere Fixierung der Katheter in der Blase verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung durch 100% Silikon.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT - Kompatibilität.



Zentral offene Spitze,
integral Ballon

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	41 cm	01/02/09/12/05/GHC	16840937
CH 14	05 ml	41 cm	01/02/09/14/05/GHC	16840943
CH 16	10 ml	41 cm	01/02/09/16/10/GHC	16840972
CH 18	10 ml	41 cm	01/02/09/18/10/GHC	16840989
CH 20	10 ml	41 cm	01/02/09/20/10/GHC	16840995
CH 22	10 ml	41 cm	01/02/09/22/10/GHC	16841003

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW UNIBAL
Suprapubische *integral* 100% Silikonkatheter
2-Wege Ballonkatheter, kurz

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.



Zentral offene Spitze,
integral Ballon

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	03 ml	33 cm	01/02/13/10/03/GHC	01152746
CH 12	05 ml	33 cm	01/02/13/12/05/GHC	01152812
CH 14	05 ml	33 cm	01/02/13/14/05/GHC	01152829
CH 16	10 ml	33 cm	01/02/13/16/10/GHC	01152841
CH 18	10 ml	33 cm	01/02/13/18/10/GHC	01152918
CH 20	10 ml	33 cm	01/02/13/20/10/GHC	01152924
CH 22	10 ml	33 cm	01/02/13/22/10/GHC	01152947

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril



Ballonvolumen: 03-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

BLUECATH
Suprapubische *integral* 100% Silikonkatheter
2-Wege Ballonkatheter mit Dilatationsspitze und Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Dilatationsspitze mit zentraler Bohrung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.



Dilatationsspitze mit zentraler
Bohrung, *integral* Ballon

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/21/12/05/GHC	11850948
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/21/14/05/GHC	11850954
CH 16	10 ml	40 cm	01/02/21/16/10/GHC	11850983
CH 18	10 ml	40 cm	01/02/21/18/10/GHC	11851008
CH 20	10 ml	40 cm	01/02/21/20/10/GHC	11851014
CH 22	10 ml	40 cm	01/02/21/22/10/GHC	11851020

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

BLUECATH
Suprapubische *integral* 100% Silikonkatheter
2-Wege Ballonkatheter mit Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszia beim Einlegen der Katheter verhindert.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ MRT - Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.



Zentral offene Spitze,
integral Ballon

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/22/12/05/GHC	11851037
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/22/14/05/GHC	11851043
CH 16	10 ml	40 cm	01/02/22/16/10/GHC	11851072
CH 18	10 ml	40 cm	01/02/22/18/10/GHC	11851089
CH 20	10 ml	40 cm	01/02/22/20/10/GHC	11851095
CH 22	10 ml	40 cm	01/02/22/22/10/GHC	11851126
CH 24	10 ml	40 cm	01/02/22/24/10/GHC	11851132

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW
Suprapubische 100% Silikonkatheter *integral blue*
2-Wege Ballonkatheter mit Stopfen

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet, so dass der Schaft keinen Kalibersprung hat. Schmerzhafte Stauchungen an der Faszia beim Einlegen des Katheters werden dadurch verhindert.
- ✓ Die Katheter zeichnen sich durch guten Tragekomfort aus.
- ✓ Für die sichere Fixierung der Katheter in der Blase verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%-iger Glycerinlösung.
- ✓ Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung durch 100% Silikon.
- ✓ Kurze, zentral offene Spitze.
- ✓ Katheterspitze mit Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT - Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.



Zentral offene Spitze,
integral Ballon

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	41 cm	01/02/11/12/05/GHC	16841026
CH 14	05 ml	41 cm	01/02/11/14/05/GHC	16841032
CH 16	10 ml	41 cm	01/02/11/16/10/GHC	16841049
CH 18	10 ml	41 cm	01/02/11/18/10/GHC	16841061
CH 20	10 ml	41 cm	01/02/11/20/10/GHC	16841078
CH 22	10 ml	41 cm	01/02/11/22/10/GHC	16841084

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril



Ballonvolumen: 05-10 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

BLUECATH

Suprapubische *integral* 100% Silikonkatheter

2-Wege Ballonkatheter mit Stopfen, kurz

- Produktspezifikationen:
- Die Katheter sind mit einem *integral* Ballon ausgestattet. Hierdurch entfällt der Kalibersprung, der bei herkömmlichen Kathetern auftritt. Somit werden schmerzhafte Stauchungen an der Faszie beim Einlegen der Katheter verhindert.
 - Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
 - Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
 - Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
 - Hervorragende Gewebeverträglichkeit und geringe Inkrustationsneigung.
 - Kurze, zentral offene Spitze.
 - MRT-Kompatibilität.
 - Graduierung zur optimalen Lagekontrolle.



Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	05 ml	33 cm	01/02/23/12/05/GHC	11851149
CH 14	05 ml	33 cm	01/02/23/14/05/GHC	11851155
CH 16	10 ml	33 cm	01/02/23/16/10/GHC	11851161
CH 18	10 ml	33 cm	01/02/23/18/10/GHC	11851178
CH 20	10 ml	33 cm	01/02/23/20/10/GHC	11851184
CH 22	10 ml	33 cm	01/02/23/22/10/GHC	11851190

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW UNIBAL

Suprapubisches Punktionsset

2-Wege *integral* Ballonkatheter

- Produktspezifikationen:
- Bestandteile des Punktionsset
- 100% Silikon *integral* Ballonkatheter
 - Spaltkanüle mit Spezialschliff
 - Stichskalpell mit kleinem Griff
- Integral* Ballonkatheter mit übergangslos in den Katheterschaft eingearbeitetem Ballon.
 - Optimale Nutzung des Innendurchmessers der Kanüle durch *integral* Ballonkatheter:

Charrière 10 und 12 mit Spaltkanüle CH 13,8 (4,6 mm), Stichlänge 120 mm.
 Charrière 14 mit Spaltkanüle CH 16,8 (5,6 mm), Stichlänge 120 mm.
 - Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
 - Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
 - Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
 - Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
 - MRT-Kompatibilität.



Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	03 ml	40 cm	01/02/15/10/03/GHC	01153059
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/15/12/05/GHC	01153065
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/15/14/05/GHC	01153088

Verpackungseinheit: 5 Stück

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW UNIBAL
Suprapubisches Wechselset, inkl. PTFE-Führungsdraht
2-Wege *integral* Ballonkatheter mit Wechseldraht

Produktspezifikationen:

Bestandteile des Wechselset

- 100% Silikon *integral* Ballonkatheter
- Wechseldraht teflonbeschichtet
- ✓ *Integral* Ballonkatheter mit übergangslos in den Katheterschaft eingearbeitetem Ballon.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch großes Innenlumen und zentral offene Spitze.
- ✓ Führungstabiler teflonbeschichteter Wechseldraht.
- ✓ Sichere Fixierung des Katheters in der Harnblase durch den *integral* Ballon.
- ✓ Dazu verwenden Sie unsere Blockerspritze mit 10%iger Glycerinlösung.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Wechseldraht teflonbeschichtet, 80 cm Länge, 3 cm gerade flexible Spitze, Drahtdurchmesser 0,035".



Zentral offene Spitze,
integral Ballon

Führungsdraht

Draht	Spitze	Länge	Artikelnummer	PZN
besch.	3 cm flex.	80 cm	01/02/18/80/35/GHC	14166431

Verpackungseinheit: 1 Stück
Verpackung: steril

Wechselset, inkl. Führungsdraht

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	03 ml	40 cm	01/02/16/10/03/GHC	01153154
CH 12	05 ml	40 cm	01/02/16/12/05/GHC	01153160
CH 14	05 ml	40 cm	01/02/16/14/05/GHC	01153183

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril



Ballonvolumen: 03-05 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

NEPHROSTOMIE
Nephrostomie *integral* 100% Silikonkatheter
2-Wege Ballonkatheter

Produktspezifikationen:


- ✓ Katheter hat hervorragende Gewebeverträglichkeit und eine geringe Inkrustationsneigung.
- ✓ Die Katheter eignen sich zur Langzeitdrainage.
- ✓ Dilatierende Nelatonspitze mit zentraler Bohrung.
- ✓ Hohe Drainageleistung durch jeweils zwei Katheteraugen vor und hinter dem Ballon.
- ✓ Röntgenkontraststreifen zur radiologischen Darstellung.
- ✓ MRT-Kompatibilität.
- ✓ Graduierung zur optimalen Lagekontrolle
- ✓ 100% Silikon



Dilatierende Nelatonspitze
mit zentraler Bohrung,
Integral Ballon

Größe	Ballon	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	1,5 ml	40 cm	01/03/10/10/01/GHC	13851171
CH 12	2,0 ml	40 cm	01/03/10/12/02/GHC	13851188
CH 14	3,0 ml	40 cm	01/03/10/14/03/GHC	13851202
CH 16	5,0 ml	40 cm	01/03/10/16/05/GHC	13851219
CH 18	5,0 ml	40 cm	01/03/10/18/05/GHC	13851225

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril

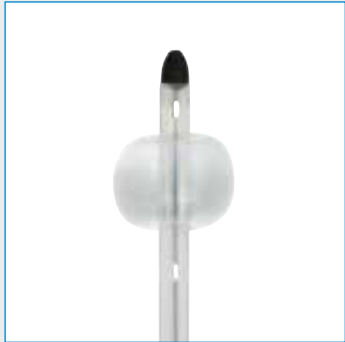

Ballonvolumen: 1,5 - 5,0 ml

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE SET
Katheterlegeset Typ Basis + Klinik

Produktspezifikationen:

- ✓ Das Katheterlege-Set ist in eine äußere und in eine innere Verpackung unterteilt.
- ✓ Bestandteil der äußeren Verpackung des Basis-Set ist: Eine sterile 10 ml Spritze zum entblocken des liegenden Katheters.
- ✓ Die Bestandteile der inneren sterilisierten Verpackung benötigt man zur Neuanlage eines transurethralen Katheters.



Artikel	Artikelnummer	PZN
Basis	01/01/99/BS/GHC	01972188
Klinik	01/01/99/BSK/GHC	08845872

CARE SET
Katheterlegeset Comfort und Comfort Plus

Produktspezifikationen:

- ✓ Das Katheterlege-Set ist in eine äußere und in eine innere Verpackung unterteilt.
- ✓ Die Bestandteile der äußeren Verpackung sind: Eine sterile 10 ml Spritze zum Entblocken des liegenden Katheters. Schleimhautdesinfektion Octenisept 15 ml
- ✓ Zusätzlich beim Comfort Plus in der äußeren Verpackung: Endosgel 6 ml.
- ✓ Die Bestandteile der inneren sterilisierten Verpackung benötigt man zur Neuanlage eines transurethralen Katheters.



Artikel	Artikelnummer	PZN
Comfort	01/01/99/KL/CO/GHC	14209815
Comfort Plus	01/01/99/KL/CP/GHC	14209821

Bestandteile der Katheterlege-Sets sind:

1 Schale

6 Tupfer

1 Pinzette

2 Unterlagen

1 Blockerspritze mit 10% Glycerin

3 NITRIL Handschuhe

1 Schlitztuch

Verpackungseinheit: 20 Stück
Verpackung: steril

Zusätzlich im Basis-Set enthalten:



10 ml Spritze

Abbildungen können vom Original abweichen

Bestandteile der Katheterlege-Sets sind:

1 Schale

6 Tupfer

1 Pinzette

10 ml Spritze

Schleimhautdesinfektion

Zusätzlich im Comfort Plus:

1 Blockerspritze mit 10% Glycerin

3 NITRIL Handschuhe

1 Schlitztuch

2 Unterlagen

Octenisept, 15 ml

Endosgel, 6 ml

Verpackungseinheit: 35 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

Produktspezifikationen:

- ✓ Das Comfort Eco-Set ist in eine äußere und in eine innere Verpackung unterteilt.
- ✓ Bestandteil der äußeren Verpackung ist: Eine sterile 10 ml Spritze zum Entblocken des liegenden Katheters. Schleimhautdesinfektion Octenisept 15 ml Gleitmittel 6 ml.
- ✓ Die Bestandteile der inneren sterilisierten Verpackung benötigt man zur Neuanlage eines transurethralen Katheters.



Artikel	Artikelnummer	PZN
Comfort Eco	01/01/99/KL/CE/GHC	16134211

Zubehör rund um den Katheterwechsel

Neben dem Sortiment an Kathetern, Drainage- und Haltesystemen liefern wir Ihnen auch das erforderliche Zubehör, um die Versorgung mit ableitenden Inkontinenzhilfsmitteln und den Katheterwechsel optimal durchführen zu können, und dadurch eine hohe Versorgungsqualität zu erreichen.

Hervorheben möchten wir:

- Die **Blockerspritze mit 10% Glycerinlösung, 10 ml** (Art.-Nr. 01/01/99/KB/10/GHC), sichert das Ballonvolumen über die Tragedauer des Ballonkatheters, ohne dass das Füllmedium diffundiert. Der Ballon-Katheter bleibt somit gut fixiert und das Risiko von Dislokationen kann nahezu ausgeschlossen werden.
- Das **Gleitgel LUBRICARE, 6 ml** (Art.-Nr. 01/01/99/GG/06/001), haftet sehr gut an der Schleimhaut an und hat ausgezeichnete Gleiteigenschaften, so dass der Katheterwechsel reibungslos durchgeführt werden kann.

Bei den dargestellten Produkten handelt es sich um einen Programmauszug; weitere Artikel gerne auf Nachfrage.



Blockerspritze mit 10% Glycerinlösung, 10 ml



Gleitgel LUBRICARE, 06 ml



Katheterstopfen



Octenisept, 15 ml

Bestandteile der Katheterlege-Sets sind:

1 Schale	6 Tupfer	1 Pinzette	10 ml Spritze	Schleimhaut-desinfektion
1 Blockerspritze mit 10% Glycerin	3 NITRIL Handschuhe	1 Schlitztuch	2 Unterlagen	Octenisept, 15 ml
				Gleitgel
				LUBRICARE, 06 ml

Verpackungseinheit: 35 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW und CARE VENT Katheterventile

zur individuellen selbstständigen Harnblasenentleerung

CARE FLOW Katheterventil

- ✓ Optimale Lösungen für mobile und selbstständige Anwender mit einem transurethralen oder suprapubischen Katheter.
- ✓ Durch ein Katheterventil wird die Blasenmuskulatur weiter ständig trainiert, somit bleibt die Blasenfunktion vollständig erhalten. Die Blasenentleerung kann im natürlichen Rhythmus des Anwenders stattfinden. Dies erhöht nachhaltig die Lebensqualität.
- ✓ Für eine ungestörte Nachtruhe ist es möglich, mittels eines fest angebrachten Silikonschlauchverbinders das Ventil an ein Beutelsystem anzuschließen.
- ✓ Durch das Umlegen des Kippventils um 180° ist das CARE FLOW Katheterventil vollständig geöffnet und zusätzlich in einer sicheren Position fixiert. Dies verhindert ein versehentliches schließen.



HMN: 15.25.16.0031



Pfeile weisen auf offene / geschlossene Position hin



Katheterventil geschlossen



Katheterventil bei 180° Stellung offen

Gewicht	Artikelnummer	PZN
3g	03/02/10/00/GHC	12378382

Verpackungseinheit: 5 Stück
Verpackung: steril

CARE VENT Katheterventil

- ✓ Die spezielle Konstruktion des CARE VENT verhindert ein Nachtropfen von Urin, nach dem selbstständigen Schließen des Ventils. So wird eine hygienische Handhabung gewährleistet.
- ✓ Die farbliche Kennung der Dreh- und Schieberegler macht die Einhandbedienung denkbar einfach.



Gewicht	Artikelnummer	PZN
6g	03/02/10/01/GHC	01914676

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: einfach steril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE CATH_{Liv}

IK-Einmalkatheter, hydrophil, 17 cm

Sofort gebrauchsfertig, Nelaton

Produktspezifikationen:

- ✓ Sehr gute Gleitfähigkeit durch hydrophile Beschichtung.
- ✓ Sofort einsatzfähig durch gebrauchsfertige, hydrophile Beschichtung.
- ✓ Atraumatische Anwendung durch abgerundete Drainageaugen.
- ✓ Optimale Länge von 17 cm gewährleistet vollständige Blasenentleerung.
- ✓ Berührungsfreie Anwendung und gute Führbarkeit durch richtige Steifigkeit des Katheters.
- ✓ Gute Griffigkeit des Griffstücks ermöglicht gute Handhabung, auch bei eingeschränkter Fingerfertigkeit.
- ✓ Konnektion von Urinauffangbeutel und/oder Instillationslösung über Konus des Griffstück leicht möglich.



Atraumatische, abgerundete Drainageaugen



HMN: 15.25.14.7011



Griffigkeit des Griffstücks

CARE CATH_{Liv}

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 10	17 cm	LIV-H1017	18890885
CH 12	17 cm	LIV-H1217	18890916
CH 14	17 cm	LIV-H1417	18890922

Verpackungseinheit: 30 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE CATHLeir

IK-Einmalkatheter, hydrophil, 41 cm
Sofort gebrauchsfertig, Nelaton

Produktspezifikationen:


- ✓ Sehr gute Gleitfähigkeit durch hydrophile Beschichtung.
- ✓ Sofort einsatzfähig durch gebrauchsfertige, hydrophile Beschichtung.
- ✓ Atraumatische Anwendung durch abgerundete Drainageaugen.
- ✓ Berührungsfreie Anwendung und gute Führbarkeit des Katheters durch leicht zu lösendes Griffstück.
- ✓ Gute Griffigkeit des Griffstücks ermöglicht gute Handhabung, auch bei eingeschränkter Fingerfertigkeit.
- ✓ Konnektion von Urinauffangbeutel und/oder Instillationslösung über Konus des Griffstück leicht möglich.



Atraumatische, abgerundete Drainageaugen



HMN: 15.25.14.7012

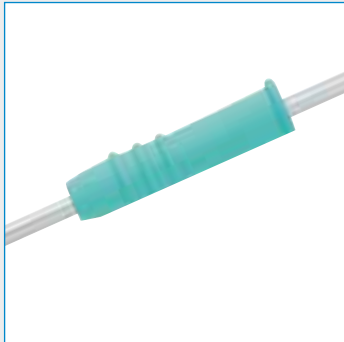

Griffigkeit des Griffstücks

CARE CATHLeir

Größe	Länge	Artikelnummer	PZN
CH 12	41 cm	LEIV-H1241	18890833
CH 14	41 cm	LEIV-H1441	18890856
CH 16	41 cm	LEIV-H1641	18890862

Verpackungseinheit: 30 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE CON comfort | Typ I

Urinalkondome aus 100% Silikon

selbstklebend

Produktspezifikationen:

- ✓ Die CARE CON comfort überzeugen durch ein angenehm zu tragendes Silikonmaterial und einen sicheren Halt.
- ✓ Die Materialdicke des Schaftes wurde so entwickelt, dass das Material sich sanft und flexibel anschmiegt, und durch festen Halt eine hohe Sicherheit bietet.
- ✓ Der stabile Schlauchansatz verhindert ein Abknicken des Urinalkondoms und ermöglicht eine feste Verbindung mit dem angeschlossenen Beutel.
- ✓ Geringe Abstufungen der einzelnen Durchmesser sichern eine optimale Passgenauigkeit.
- ✓ Das medizinische Silikonmaterial erhält die Atmungsaktivität der Haut.
- ✓ Durch das transparente Material sind jederzeit etwaige Hautveränderungen oder Reizungen zu erkennen.
- ✓ Mit einer Schaftlänge von 8,0 cm und einer Klebefläche von 4,5 cm entspricht das CARE CON comfort den Anforderungen vieler Urinalkondomträger.



HMN: 15.25.04.7049

Durchmesser	Schaft / Klebefläche	Artikelnummer	PZN
25 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/28/01/25/GHC	17520554
28 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/28/01/28/GHC	17520583
30 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/28/01/30/GHC	17520620
32 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/28/01/32/GHC	17520637
36 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/28/01/36/GHC	17520643
41 mm	8,0 cm / 4,5 cm	01/01/28/01/41/GHC	17520666

Verpackungseinheit: 30 Stück
Verpackung: unsteril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE CON special | Typ II
Urinalkondome aus 100% Silikon
selbstklebend

Produktspezifikationen:

- ✓ Die CARE CON special überzeugen durch ein angenehm zu tragendes Silikonmaterial und einem sicheren Halt, trotz der kurzen Schaftlänge.
- ✓ Die Dicke des Schaftes wurde so entwickelt, dass das Material sich sanft und flexibel anschmiegt - und durch festen Halt eine hohe Sicherheit bietet.
- ✓ Der stabile Ansatz verhindert ein Abknicken des Urinalkondoms und ermöglicht eine feste Verbindung mit dem angeschlossenen Beutel.
- ✓ Geringe Abstufungen der einzelnen Durchmesser sichern eine optimale Passgenauigkeit.
- ✓ Mit einer Schaftlänge von 5,0 cm und einer Klebefläche von 4,0 cm entspricht das special-Modell den speziellen Anforderungen der Anwender mit zurückgezogenem, retrihiertem Penis.
- ✓ Das medizinische Silikonmaterial erhält die Atmungsaktivität der Haut.
- ✓ Durch das transparente Material sind jederzeit etwaige Hautveränderungen oder Reizungen zu erkennen.



HMN: 15.25.04.7047

Durchmesser	Schaft / Klebefläche	Artikelnummer	PZN
25 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/28/02/25/GHC	17520672
28 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/28/02/28/GHC	17520689
30 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/28/02/30/GHC	17520703
32 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/28/02/32/GHC	17520726
36 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/28/02/36/GHC	17520732
41 mm	5,0 cm / 4,0 cm	01/01/28/02/41/GHC	17520749

Verpackungseinheit: 30 Stück
Verpackung: unsteril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE CON active | Typ III
Urinalkondome aus 100% Silikon
selbstklebend

Produktspezifikationen:

- ✓ Die CARE CON active überzeugen durch ein angenehm zu tragendes Silikonmaterial und einem sicheren Halt mit extra-langer Klebefläche.
- ✓ Die Dicke des Schaftes wurde so entwickelt, dass das Material sich sanft und flexibel anschmiegt - und durch festen Halt eine hohe Sicherheit bietet.
- ✓ Der stabile Ansatz verhindert ein Abknicken des Urinalkondoms und ermöglicht eine feste Verbindung mit dem angeschlossenen Beutel.
- ✓ Geringe Abstufungen der einzelnen Durchmesser sichern eine optimale Passgenauigkeit.
- ✓ Mit einer Schaftlänge von 8,0 cm und einer Klebefläche von 7,0 cm entspricht das active-Modell den speziellen Anforderungen der sportlichen und aktiven Anwender.
- ✓ Das medizinische Silikonmaterial erhält die Atmungsaktivität der Haut.
- ✓ Durch das transparente Material sind jederzeit etwaige Hautveränderungen oder Reizungen zu erkennen.



HMN: 15.25.04.7048

Durchmesser	Schaft / Klebefläche	Artikelnummer	PZN
25 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/28/03/25/GHC	17520755
28 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/28/03/28/GHC	17520761
30 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/28/03/30/GHC	17520784
32 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/28/03/32/GHC	17520790
36 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/28/03/36/GHC	17520809
41 mm	8,0 cm / 7,0 cm	01/01/28/03/41/GHC	17520815

Verpackungseinheit: 30 Stück
Verpackung: unsteril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW UB 4000TUR Geschlossenes TUR Spülbeutelsystem Mit Pumpball zur kontrollierten postoperativen Blasenspülung Füllvolumen: 4000 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Der Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht eine sichere und korrekte Befestigung an den unterschiedlichsten Bettholmen.
- ✓ Die Bakterien- und flüssigkeitsdichten Belüftungsfilter sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage im System erzielt.
- ✓ Durch das kontrollierte Spülen der Blase mit dem am Zuleitungsschlauchsystem integrierten Pumpball, kann das postoperativ mögliche Austamponieren der Blase vermieden werden.
- ✓ Eine auf dem Beutel aufgebrachte Rückstecklasche garantiert eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
4000 ml	120 cm	04/02/4000/TUR/GHC	06189004

HMN: 15.25.09.0008

CARE FLOW UB 4000 Geschlossenes Urindrainagesystem Füllvolumen: 4000 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Der Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht eine sichere und korrekte Befestigung an den unterschiedlichsten Bettholmen.
- ✓ Die Bakterien- und flüssigkeitsdichten Belüftungsfilter sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage im System erzielt.
- ✓ Eine übersichtliche Skalierung sorgt für eine sichere Volumenkontrolle.
- ✓ Eine auf dem Beutel aufgebrachte Rückstecklasche garantiert eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Knickstabiler Schlauch.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
4000 ml	120 cm	04/02/4000/120/GHC	06718939

HMN: 15.25.09.0009

44



Pumpball

Unter Einsatz vom Pumpball und der beiden Schlauchklemmen, ist es in einem speziellen Zusammenspiel dieser Komponenten möglich, die Blase wie auch das Schlauchsystem von Blutkoageln bzw. Prostataspänen frei zuspülen.



Profilschlauch

Das oktagonale Innenprofil des Zuleitungsschlauchs gewährleistet eine hervorragende Stabilität. Der großlumig flexible Schlauch garantiert somit in jeder Situation eine sichere Urindrainage zur Tropfkammer.



Tropfkammer

Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



Ablasshahn im Doghouse

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

45



Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Profilschlauch

Das oktagonale Innenprofil des Zuleitungsschlauchs gewährleistet eine hervorragende Stabilität. Der großlumig flexible Schlauch garantiert somit in jeder Situation eine sichere Urindrainage zur Tropfkammer.



Tropfkammer

Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



Ablasshahn im Doghouse

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackungseinheit: 20 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care

Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FLOW UB 2000
Geschlossene Urindrainagesysteme
Füllvolumen: 2000 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht die sichere Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen.
- ✓ Bakterien- und flüssigkeitsdichte BelüftungsfILTER sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage in den Systemen erzielt.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.
- ✓ Sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns im Doghouse.
- ✓ Eingearbeiteter T-Ablasshahn.
- ✓ Knickstabiler Schlauch.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
2000 ml	120 cm	04/02/2000/120/GHC	06718922
2000 ml	90 cm	04/02/2000/90/GHC	09151597

Verpackungseinheit: 20 Stück
Verpackung: steril

HMN: 15.25.07.0050

CARE FLOW UB 2000S
Geschlossene Urindrainagesysteme
Füllvolumen: 2000 ml, weicher Schlauch

Produktspezifikationen:

- ✓ Urindrainagesystem mit Tropfkammer verhindert das Aufsteigen von Keimen und somit von Infektionen.
- ✓ Schlauch mit großem Innenlumen aus weichem Material sichert ein sehr gutes Abfließen des Urins und hohen Anwendungskomfort.
- ✓ Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht die sichere Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen.
- ✓ Bakterien- und flüssigkeitsdichte BelüftungsfILTER sorgen für einen permanenten Druckausgleich.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.
- ✓ Sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns im Doghouse.
- ✓ Aufgesetzter T-Ablasshahn.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
2000 ml	120 cm	04/02/2000S/120	18728133
2000 ml	90 cm	04/02/2000S/90	18728179

Verpackungseinheit: 50 Stück
Verpackung: steril

HMN: 15.25.07.0003

46



Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Profilschlauch

Das oktagonale Innenprofil des Zuleitungsschlauchs gewährleistet eine hervorragende Stabilität. Der großlumig flexible Schlauch garantiert somit in jeder Situation eine sichere Urindrainage zur Tropfkammer.



Tropfkammer

Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.



Ablasshahn im Doghouse

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Vorschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackungseinheit: 20 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care GmbH Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

47

Der CARE FLOW BAG dient als Sichtschutz für die CARE FLOW UB 2000 als diskrete Aufbewahrung der Bettbeutel.

Produktspezifikationen:

- ✓ Durch praktische Klettverschlüsse ist der Sichtschutz schnell und einfach am Urinbeutel angebracht. Ein weiterer Klettverschluss auf der Vorderseite erlaubt eine saubere und unkomplizierte Entnahme des Ablasshahns sowie dessen Rückführung.
- ✓ Der Sichtschutz besteht aus 100% Polypropylen (PP) und ist somit u.a. beständig gegen organische Säuren.
- ✓ Der Sichtschutz ist hellgrau, bei 30° waschbar und so zur Wiederverwendung geeignet.



Artikelnummer	PZN
04/99/01/945/GHC	09764331

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: nicht steril

Abbildungen können vom Original abweichen

GHC German Health Care GmbH Tel. +49 (0) 46 31 57 200-0 | Fax +49 (0) 46 31 57 200-19 | E-Mail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

CARE FLOW UB 2000A Bettbeutel

Steriler Bettbeutel mit integriertem Zwillingshalter

Füllvolumen: 2000 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Zwillingshalter mit zusätzlicher Befestigungskordel ermöglicht die sichere Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem System. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.
- ✓ Ein Rücksteckschlitz garantiert die sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Knickstabiler Schlauch.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN
2000 ml	110 cm	04/04/2000/110/GHC	08871289

HMN: 15.25.06.3037

CARE FLOW UB 2000E, UB 2000US

Sterile/ Unsterile Einmalbettbeutel mit Halterung

Füllvolumen: 2000 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Das System ist mit einem universellen Stufenkonus ausgestattet und kann dadurch an alle gängigen Katheter angeschlossen werden.
- ✓ Die Produkte sind für den täglichen Wechsel ausgelegt.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus den Systemen. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.
- ✓ Für die Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen benutzen Sie den unten abgebildeten Zwillingshalter.
- ✓ Der Urinbeutel wird durch das T- Ablassventil sicher entleert.



Produkt	Volumen	Sterilität	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	HMN
UB 2000E	2000 ml	Steril	90 cm	04/04/2000/90/GHC	16047274	15.25.06.3025
UB 2000US	2000 ml	Unsteril	90 cm	04/06/2000/90/GHC	12418549	15.25.06.1047
UB 2000US	2000 ml	Unsteril	130 cm	04/06/2000/130/GHC	08845487	15.25.06.1047

UB 2000E: **Verpackungseinheit:** 100 Stück, **Verpackung:** steril
 UB 2000US: **Verpackungseinheit:** 100 Stück, **Verpackung:** nicht steril **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück

Halterung für UB 2000E und UB 2000US

- ✓ Bettbeutelhalterung aus Kunststoff mit Zwillingshalter. Ausgestattet mit zwei Dornen zur Aufnahme der Einmalbettbeutel an ihren vorgestanzten Ösen.

Artikelnummer	PZN
04/99/BHL/PVC/GHC	06718951

Verpackungseinheit: 100 Stück **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück
Verpackung: nicht steril



Stufenkonnektor
 Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Profilschlauch
 Das oktagonale Innenprofil des Zuleitungsschlauchs gewährleistet eine hervorragende Stabilität. Der großlumig flexible Schlauch garantiert somit in jeder Situation eine sichere Urindrainage zur Tropfkammer.



BelüftungsfILTER
 Ein bakterien- und flüssigkeitsdichter BelüftungsfILTER sorgt für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage im System erzielt.



Ablasshahn
 Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackungseinheit: 50 Stück
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW UB 2000USo, UB 1500USo, SB 1500USo

Unsterile Einmalbettbeutel/Sekretbeutel ohne Ablassventil

Füllvolumen: 2000 ml, 1500 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Beutel sind mit einem universellen Stufenkonnektor ausgestattet, so dass die Beutel an alle gängigen Katheter angeschlossen werden können.
- ✓ Die Produkte sind zum Einmalgebrauch ausgelegt.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus den Beuteln, so dass der Gefahr aufsteigender Infektionen wirksam vorgebeugt wird (außer beim SB 1500USo).
- ✓ Für die Befestigung an unterschiedlichen Bettholmen benutzen Sie den unten abgebildeten Zwillingshalter.



Produkt	Volumen	Schlauchlänge	Refluxventil	Artikelnummer	PZN	HMN
UB 2000USo	2000 ml	90 cm	ja	04/07/2000/90/GHC	08845501	15.25.06.0024
UB 1500USo	1500 ml	90 cm	ja	04/07/1500/90/01	16839791	15.25.06.0034
SB 1500USo	1500 ml	90 cm	nein	04/07/1500/90/00	16839785	-

UB 2000USo: **Verpackungseinheit:** 150 Stück, **Verpackung:** nicht steril **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück
 UB 1500USo: **Verpackungseinheit:** 200 Stück, **Verpackung:** nicht steril **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück
 SB 1500USo: **Verpackungseinheit:** 200 Stück, **Verpackung:** nicht steril **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück

Halterung für UB 2000USo, UB 1500USo, SB 1500USo

- ✓ Bettbeutelhalterung aus Kunststoff mit Zwillingshalter. Ausgestattet mit zwei Dornen zur Aufnahme der Einmalbettbeutel an ihren vorgestanzten Ösen.



Artikelnummer	PZN
04/99/BHL/PVC/GHC	06718951

Verpackungseinheit: 100 Stück **Unterverpackung:** jeweils 10 Stück
Verpackung: nicht steril

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW UB 1000 Urindrainagesysteme

Beinbeutelsysteme für den Tag & die Nacht

Füllvolumen: 1000 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Geschlossenes Urindrainagesystem.
- ✓ Die bakterien- und flüssigkeitsdichten Belüftungsfiter sorgen für einen permanenten Druckausgleich. Dadurch wird eine optimale Drainage in den Systemen erzielt.
- ✓ Eine Rückstecklasche garantiert eine sichere und hygienische Positionierung des Ablasshahns.
- ✓ T-Ablasshahn.
- ✓ Urinentnahmestelle.
- ✓ Übersichtliche Skalierung.



Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	HMN
1000 ml	30 cm	04/03/1000/30/GHC	06718885	15.25.07.1012
1000 ml	60 cm	04/03/1000/60/GHC	06718891	15.25.07.1013
1000 ml	90 cm	04/03/1000/90/GHC	06718916	15.25.07.1014



Stufenkonnektor
 Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Tropfkammer
 Ein Rücklaufventil unterteilt die Tropfkammer und verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin. Somit wird hochwirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.

Verpackungseinheit: 30 Stück
Verpackung: steril



Vliesbeschichtung
 Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



Ablasshahn
 Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Vorschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Halterungen für Beinbeutel Seite 55-60.

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW UB 750 + 750US sterile/unsterile
Beinbeutelsysteme für den mobilen Anwender
Füllvolumen: 750 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Beinbeutel mit 10 cm und 30 cm Schlauchlänge werden komfortabel am Oberschenkel fixiert.
- ✓ Dem Beinbeutel mit 50 cm Schlauchlänge ist in der Verpackung jeweils ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht es, den Schlauch individuell zu kürzen. Somit kann man den Beinbeutel am Oberschenkel bzw. Unterschenkel komfortabel fixieren.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus den Systemen. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
750 ml	10 cm	04/01/750/10/GHC	06718862	steril
750 ml	30 cm	04/01/750/30/GHC	09772046	steril
750 ml	50 cm	04/01/750/50/GHC	06718879	steril

Verpackungseinheit: 10 cm: 75 Stück 30 cm: 60 Stück, 50 cm: 50 Stück

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
750 ml	10 cm	04/01/750US/10/GHC	01972716	unsteril
750 ml	30 cm	04/01/750US/30/GHC	12341427	unsteril
750 ml	50 cm	04/01/750US/50/GHC	00226543	unsteril

Verpackungseinheit: 10 cm: 120 Stück 30 cm: 100 Stück, 50 cm: 100 Stück, Unterverpackung: jeweils 10 Stück



HMN: 15.25.05.3071
(Art.-Nr. 04/01/750)
HMN: 15.25.05.1096
(Art.-Nr. 04/01/750US)

CARE FLOW UB 750 F + UB 750UF sterile/unsterile
Beinbeutelsystem für den mobilen Anwender
Füllvolumen: 750 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Besonders Anwender mit einer eingeschränkten Handmotorik oder mit reduzierter Kraft können sicher und hygienisch den Beinbeutel mittels unseres neu entwickelten **Kippventils** entleeren.
- ✓ Dem Beinbeutel mit 50 cm Schlauchlänge ist in der Verpackung jeweils ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht es, den Schlauch individuell zu kürzen. Somit kann man den Beinbeutel am Oberschenkel bzw. Unterschenkel komfortabel fixieren.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem Beuteln. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
750 ml	50 cm	04/01/750F/50/GHC	12371500	steril

Verpackungseinheit: 50 cm: 50 Stück

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
750 ml	50 cm	04/01/750UF/50/GHC	12371517	unsteril

Verpackungseinheit: 50 cm: 100 Stück
Unterverpackung: jeweils 10 Stück



HMN: 15.25.05.3071
(Art.-Nr. 04/01/750F)
HMN: 15.25.05.1096
(Art.-Nr. 04/01/750UF)



Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Doghouse

Eine auf dem Beutel aufgebrachte belüftete Rückstecklasche gewährleistet eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.



Vliesbeschichtung

Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißaufsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



Ablasshahn

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackung: steril / unsteril

Halterungen für Beinbeutel Seite 55-60.

Abbildungen können vom Original abweichen



Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Doghouse

Eine auf dem Beutel aufgebrachte belüftete Rückstecklasche gewährleistet eine sichere und zugleich hygienische Positionierung des Ablasshahns.



Vliesbeschichtung

Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißaufsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



Ablasshahn

Das ergonomisch geformte, flache **Kippventil** vom Ablaufschlauch lässt sich einfach und intuitiv bedienen. Um den Beinbeutel zu entleeren kippen Sie das Ablassventil um 180° nach unten.

Verpackung: steril / unsteril

Halterungen für Beinbeutel Seite 55-60.

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FLOW UB 500 + UB 500US sterile/unsterile

3-Kammer-Beinbeutelsysteme für den mobilen Anwender

Füllvolumen: 500 ml

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Beinbeutel mit 10 cm und 30 cm Schlauchlänge werden komfortabel am Oberschenkel fixiert.
- ✓ Dem Beinbeutel mit 50 cm Schlauchlänge ist in der Verpackung jeweils ein weiterer Stufenkonnektor beigelegt. Dies ermöglicht es, den Schlauch individuell zu kürzen. Somit kann man den Beinbeutel am Oberschenkel bzw. Unterschenkel komfortabel fixieren.
- ✓ Ein Refluxventil verhindert zuverlässig den Rückfluss von Urin aus dem Beuteln. Somit wird wirksam der Gefahr von aufsteigenden Infektionen vorgebeugt.

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
500 ml	10 cm	04/01/500/10/GHC	09084990	steril
500 ml	30 cm	04/01/500/30/GHC	12341203	steril
500 ml	50 cm	04/01/500/50/GHC	09085009	steril

Verpackungseinheit: 10 cm: 75 Stück, 30 cm: 60 Stück, 50 cm: 50 Stück

Volumen	Schlauchlänge	Artikelnummer	PZN	Sterilität
500 ml	10 cm	04/01/500US/10/GHC	09085015	unsteril
500 ml	30 cm	04/01/500US/30/GHC	12341410	unsteril
500 ml	50 cm	04/01/500US/50/GHC	09085021	unsteril

Verpackungseinheit: 10 cm: 120 Stück, 30 cm: 100 Stück, 50 cm: 100 Stück, Unterverpackung: jeweils 10 Stück



HMN: 15.25.05.3094
(Art.-Nr. 04/01/500)

HMN: 15.25.05.1118
(Art.-Nr. 04/01/500US)

CARE FIX

Klettthalteband Universal

individuell kürzbar

Produktspezifikationen:

- ✓ Klettthalteband mit zwei aufgenähten Klettschlaufen zur Aufnahme der gestanzten Ösen am oberem Teil des Beinbeutels.
- ✓ Das elastische Material vermeidet bestmöglich eine Störung der Blutzirkulation am Ober- bzw. Unterschenkel.
- ✓ 70 cm langes Klettband individuell kürzbar zum Tragen am Ober- als auch am Unterschenkel.
- ✓ Es eignet sich zur Aufnahme folgender Urinbeinbeutelsysteme: UB 1000, UB 750, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.



- 60°
- ✗ Nicht in den Trockner geben
- ✗ Nicht bügeln

Länge	Artikelnummer	PZN
70 cm	05/01/BKL/Uni/GHC	06718968

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: unsteril

HMN: 15.99.99.0008



Stufenkonnektor

Die spezielle Ausrichtung der Konnektorstufen sorgt für eine zuverlässige Verbindung mit der Ringverstärkung im Kelch der Katheter. Die nadelfreie Urinprobeentnahme verhindert Nadelstichverletzungen.



Drei Kammern

Aufgrund der drei Kammern, verteilt sich der Urin im System gleichmäßiger. So lässt sich der Beinbeutel auch im gefüllten Zustand noch diskreter unter der Kleidung tragen.



Vliesbeschichtung

Die Rückseite des Beinbeutels ist mit einem schweißaufsaugenden Vlies beschichtet. Dies beugt Hautreizungen wirksam vor und erhöht somit den Tragekomfort für den Anwender.



Ablasshahn

Eine spezielle Konterwulst am Kolben des Ablasshahns garantiert eine einfache und sichere Handhabung. Leckagen, verursacht durch ein zu weites Verschieben des Kolbens, sind damit ausgeschlossen.

Verpackung: steril / unsteril

Halterungen für Beinbeutel Seite 55-60.

Abbildungen können vom Original abweichen

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FIX
Kletthaltebänder Premium-Set
individuell kürzbar

Produktspezifikationen:

- ✓ Sets bestehend aus:
einem extra breiten Kletthalteband mit zwei
aufgenähten Klettschlaufen zur Aufnahme der
gestanzten Ösen am oberem Teil des Beinbeutels.
- ✓ Beide Sets haben eine aufgenähte Lasche zur
Fixierung des Beinbeutelschlauches.
- ✓ Das zweite schmale Klettband gewährleistet einen
sicheren Halt am unteren Teil der Beinbeutel.
- ✓ Rückseitig aufgebrachte Silikonstreifen für
besonders guten Halt am Bein.
- ✓ Das elastische Material vermeidet bestmöglich eine
Störung der Blutzirkulation am Ober- bzw. Unterschenkel.
- ✓ 70 cm langes Klettband individuell kürzbar zum Tragen
am Ober- als auch am Unterschenkel.
- ✓ Fingerlasche zum einfachen Öffnen des Klettbandes.

Länge	Artikelnummer	PZN
70 cm	05/01/BKL/PRE/SET	09241099

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: unsteril



HMN: 15.99.99.0008

CARE FIX
Fixierstrümpfe mit integrierter Beinbeuteltasche

Produktspezifikationen:

- ✓ Weiche, gerippte Beinbeutelfixierstrümpfe mit
integrierter Beinbeuteltasche.
- ✓ Komfortable und sichere Fixierung am Ober-
als auch am Unterschenkel.
- ✓ Einfaches Entleeren der Beinbeutel durch
komfortable Führung des Ablasshahns.
- ✓ Besonders einfaches Anlegen dank extra breitem
Klettverschluss (bei Art.-Nr. 05/02/10).
- ✓ Die CARE FIX Fixierstrümpfe eignen sich zur
Aufnahme folgender Urinbeinbeutelsysteme:
UB 750, UB 750F, UB 750US, UB 750UF,
UB 500 und UB 500US.

Größe	Artikelnummer	PZN
XXL	05/02/10/OS/XXL/GHC	08880957
XL	05/02/10/OS/XL/GHC	08871272
L	05/02/10/OS/L/GHC	08876513
M	05/02/10/OS/M/GHC	08845748
S	05/02/10/US/S/GHC	07126649

Größenumfang: XXL = 60 - 85 cm, XL = 50 - 60 cm,
L = 40 - 60 cm, M = 35 - 45 cm, S = 25 - 40 cm

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: unsteril

- 60°
- ☒ Nicht in den Trockner geben
- ☒ Nicht bügeln

Gemessen wird mittig am Ober- oder Unterschenkel.

Größe	Artikelnummer	PZN
XL	05/02/11/OS/XL/GHC	12418555
L	05/02/11/OS/L/GHC	07126017
M	05/02/11/OS/M/GHC	07126023
S	05/02/11/US/S/GHC	07126313

Größenumfang: XL = 65 - 95 cm, L = 55 - 80 cm,
M = 45 - 65 cm, S = 30 - 45 cm

Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: unsteril



HMN: 15.99.99.0009



HMN: 15.99.99.0009

Abbildungen können vom Original abweichen

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FIX
Oberschenkelstulpen Größen: XL, L, M

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Oberschenkelstulpe ist aus weichem waschbaren Baumwollmischgewebe mit integrierter Beinbeuteltasche.
- ✓ Rückseitig aufgebrachter Silikonstreifen, ermöglicht einen bestmöglichen Halt der Stulpe.
- ✓ Beidseitig tragbar.
- ✓ Aufnahme der Beinbeutel durch die mittels Klettverschluss zu öffnende integrierte Tasche; inklusive Öffnung für Ablasshahn.
- ✓ Die CARE FIX Stulpen eignen sich zur Aufnahme folgender Urinbeutelsysteme: UB 1000, UB 750, UB 750A, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.



CARE FIX
Unterschenkelstulpen Größen: L, M, S

Produktspezifikationen:

- ✓ Die Unterschenkelstulpe ist aus weichem waschbaren Baumwollmischgewebe mit integrierter Beinbeuteltasche.
- ✓ Rückseitig aufgebrachter Silikonstreifen, ermöglicht einen bestmöglichen Halt der Stulpe.
- ✓ Beidseitig tragbar.
- ✓ Aufnahme der Beinbeutel durch die mittels Klettverschluss zu öffnende integrierte Tasche; inklusive Öffnung für Ablasshahn.
- ✓ Die CARE FIX Stulpen eignen sich zur Aufnahme folgender Urinbeutelsysteme: UB 1000, UB 750, UB 750A, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.



58

- 60°
- Nicht in den Trockner geben
- Nicht bügeln

Gemessen wird mittig am Oberschenkel.

Oberschenkelstulpen

Größe	Artikelnummer	PZN
XL	05/02/12/XL/GHC	09080408
L	05/02/12/L/GHC	09080383
M	05/02/12/M/GHC	09080377

Größenumfang: XL = 61 cm, L = 58 cm, M = 54 cm

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: unsteril



HMN: 15.99.99.0009

Abbildungen können vom Original abweichen

59

- 60°
- Nicht in den Trockner geben
- Nicht bügeln

Gemessen wird mittig am Unterschenkel.

Unterschenkelstulpen

Größe	Artikelnummer	PZN
L	05/02/13/L/GHC	09080437
M	05/02/13/M/GHC	09080420
S	05/02/13/S/GHC	09080414

Größenumfang: L = 37 cm, M = 35 cm, S = 32 cm

Verpackungseinheit: 10 Stück

Verpackung: unsteril



HMN: 15.99.99.0009

Abbildungen können vom Original abweichen

CARE FIX
Einbeinhosen Premium Größen: XL, L, M

Produktspezifikationen:

- ✓ Premium Einbeinhosen aus weichem Baumwollmischgewebe mit integrierter Beinbeuteltasche.
- ✓ Individuell einstellbarer, breiter Hüftgürtel mit rückseitigen Silikonstreifen zur besseren Fixierung.
- ✓ Beidseitig tragbar.
- ✓ Aufnahme der Beinbeutel durch die mittels Klettverschluss zu öffnende integrierte Tasche; inklusive Öffnung für Ablasshahn.
- ✓ Einfaches Entleeren der Beinbeutel durch komfortable Führung des Ablasshahns.
- ✓ Sie eignen sich zur Aufnahme folgender Urinbeutelsysteme: UB 1000, UB 750, UB 750A, UB 750F, UB 750US, UB 750UF, UB 500 und UB 500US.



CARE DRESS
Suprapubisches Verbandset

Produktspezifikationen:

- ✓ Suprapubisches Verbandset mit Schlitzkompressen zur optimalen Versorgung der suprapubischen Punktionsstelle.
- ✓ Das beigefügte kleinere Pflaster dient der vorübergehenden Fixierung des suprapubischen Katheters an der Bauchdecke und verhindert so ein Verrutschen des Katheters.



- 60°
- ✗ Nicht in den Trockner geben
- ✗ Nicht bügeln

Gemessen wird mittig am Ober- oder Unterschenkel.

Größe	Artikelnummer	PZN
XL	05/03/10/XL/GHC	09080472
L	05/03/10/L/GHC	09080466
M	05/03/10/M/GHC	09080443

Größenumfang: XL = 98 - 120 cm, L = 90 - 100 cm, M = 85 - 95 cm
Verpackungseinheit: 10 Stück
Verpackung: unsteril



HMN: 15.99.99.0009

Abbildungen können vom Original abweichen

Verpackungsinhalt:

- 1 x Stretch Pflaster 10 x 10 cm
- 1 x Stretch Pflaster 5 x 3 cm
- 3 x Vlieskompressen 5 x 5 cm, 6-fach
- 2 x Vliesschlitzkompressen 5 x 5 cm, 6-fach
- Verpackt in 1 Tiefziehpackung -

Artikelnummer	PZN
08/02/VS/GHC	06718974

Verpackungseinheit: 25 Sets
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

Produktspezifikationen:

- ✓ Abdominales PEG Verbandset zur optimalen Versorgung der PEG-Punktionsstelle.



Verpackungsinhalt:

- 1 x Stretch Pflaster 12 x 15 cm
- 2 x Vlieskompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-fach
- 2 x Vliesschlitzkompressen 7,5 x 7,5 cm, 4-fach
- Verpackt in 1 Tiefziehpackung -

Artikelnummer	PZN
08/02/PEG/GHC	05461059

Verpackungseinheit: 15 Sets
Verpackung: steril

Abbildungen können vom Original abweichen

Besuchen Sie unsere Website www.ghc-medical.de.

Dort finden Sie detaillierte Informationen über unser Unternehmen sowie dem gesamten Produktportfolio.

Unser Vertriebsteam freut sich auf Ihren Anruf:

Mo.-Do.: 08:00 – 17:00 Uhr

Fr.: 08:00 – 14:00 Uhr

Kontakt:

GHC German Health Care GmbH
Birkclück 15
24999 Wees/Flensburg

Tel.: +49 (0) 46 31 57 200-0

Fax: +49 (0) 46 31 57 200-19

info@ghc-medical.de
www.ghc-medical.de



GHC German Health Care GmbH
Birkstück 15
24999 Wees/Flensburg

Tel.: +49 (0) 46 31 57 200-0
Fax: +49 (0) 46 31 57 200-19

info@ghc-medical.de
www.ghc-medical.de

Stand 12/2023